

Anvisning för kanylburkar, PBS-serien

1

Placera burken på ett stabilt och plant underlag. Läg på locket.



2

Tryck ner locket tills du hör klickljuden. Fortsätt runt hela omkretsen.



3

Pressa, efter behov, ner säkerhetsflikarna.



4

Avlägsna kanyler eller lägg i annat avfall. Respektera den maximala fyllnadsnivån som finns markerad på burken.



5



Förslutningslocket kan vändas i 2 lägen:
1. Temporär förslutning
2. Permanent låsning.



PBS-serien innehåller kanylburkar i 6 olika utföranden med volym 0,6-12 liter.



Samtliga kanylburkar från San Sac är godkända för ADR-transport av smittförande ämnen, UN 3291. Produkterna uppfyller även kraven i NFX30-500 och BS7320:1990 avseende täthet och punktionsbeständighet.

